

Ultrana CWC 2000

Geruchsvernichter und Desinfektionskonzentrat speziell für Toilettenstühle und Bettschüsseln sowie zum Behandeln von Inkontinenz-Slips bzw. Inkontinenz-Material

Eigenschaften:

Ultrana CWC 2000 überdeckt alle unangenehmen Gerüche und wirkt Dank seiner desinfizierenden Wirkung keimtötend und selbstreinigend. Ultrana CWC 2000 ist mit positivem Ergebnis dermatologisch getestet und damit auch einsetzbar zum Behandeln von Inkontinenz-Slips. Überdeckt nahezu alle unangenehmen Gerüche damit man sich auch tagsüber sicher fühlt. Es ist formaldehydfrei, biologisch abbaubar, nicht ätzend und somit einfach in der Handhabung.

Anwendung im Toilettenstuhl bzw. Bettschüssel:

Auf 2 Liter Wasser im Toilettenstuhl 2 Spritzer (ca. 7 ml) Ultrana CWC 2000 zugeben und für ca. 48 Stunden unangenehme Gerüche überdecken. Inhalt einer 500 ml Flasche reicht aus für ca. 80 Toilettenstuhlfüllungen.

Behandeln von Inkontinenz-Slips bzw. Inkontinenz-Material:

Zum Einsprühen von Inkontinenz-Slips einfach vor dem Tragen aus ca. 10 – 15 cm Entfernung 1- 3 Pumphübe je nach Bedarf mittels Sprühflasche auftragen. Danach kurz einwirken lassen.

Oberflächendesinfektion:

Einfach die zu desinfizierende Fläche einsprühen, einwirken lassen und anschließend mit klarem Wasser abspülen. Achtung, direktes Einatmen der Dämpfe vermeiden!
CWC 2000 wirkt bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten bei niedriger und hoher Belastung bakterizid sowie fungizid (inkl. MRSA) sowie levurozid bei einer Einwirkzeit von 15 Minuten gem. DIN EN 13697. CWC 2000 ist geeignet als Sprühdeseinfektion für jegliche Oberflächen in medizinischen und öffentlichen Einrichtungen, Arztpraxen und Privathaushalten (OP-Fliesen, ohne Mechanik, geringe Belastung). Zum Desinfizieren von Krankenbetten, Rollstühlen, Türklinken sowie allen sonstigen betroffenen abwaschbaren Oberflächen.

Inhaltstoffe (pro 100g):

Flüssige Zubereitung zur Desinfektion und Reinigung im Privatbereich und zum gewerbsmäßigen Gebrauch mit 4,75 g Quartanäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-Chloride, unter 5 % nichtionische Tenside. Enthält Duftstoffe (Limonene)

BauA reg.-Nr.: N-46697

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Registrierung/Listung:

PZN 125 ml: 3994685 EAN13: 401136 800616 6

PZN 500 ml: 3956851 EAN13: 401136 800617 3

PZN 500ml Sprühflasche: 10010962 EAN13: 401136 800619 7

Verpackungseinheit:

Karton 24 Flaschen a 125 ml

Karton 16 Flaschen a 500 ml

Karton 12 Sprühflaschen a 500 ml



Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen. Die Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung.

Sitz der Gesellschaft:
Rosengartenweg 5
DE-88348 Bad Saulgau - Bogenweiler
Tel: +49 7581 2007 298
Fax: +49 7581 2007 685

Geschäftsführer: Joachim Traub
Handelsregister Ulm HRB 726799
SteuerNr: 81060/06886
www.ultrana.de
Email: info@ultrana.de
Ust.-Ident.-Nr.: DE 278287371

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Bad Saulgau
KontoNr: 11 80 9000
BLZ: 650 630 86
IBAN: DE76 6506 3086 0008 9330 06
BIC: GENODES1SAG

Ultrana GmbH

Rosengartenweg 5
D-88348 Bad Saulgau

Münster, 22.04.2013

Zertifikat
über das Produkt:
CWC2000


Dermatologische Prüfungen am Menschen 2013

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit

„sehr gut“

Bei dem genannten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien **keine** toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.

Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.


Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest[®] GmbH | Engelstr. 37 | 48143 Münster | Germany

Tel.: +49 251 4882249 | Fax: +49 251 4902727

www.dermatest.de | info@dermatest.de

Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss

Amtsgericht Münster HRB 1348 | Münsterländische Bank Thie & Co.

BLZ 400 300 00 | Konto-Nr. 3 492 784 800 | USt-ID: DE126040147

Die Angaben auf dieser Produktinformation entsprechen unseren neuesten Erkenntnissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.

Sitz der Gesellschaft:
Rosengartenweg 5
DE-88348 Bad Saulgau - Bogenweiler
Tel: +49 7581 2007 298
Fax: +49 7581 2007 685

Geschäftsführer: Joachim Traub
Handelsregister Ulm HRB 726799
SteuerNr: 81060/06886
www.ultrana.de
Email: info@ultrana.de
Ust.-Ident-Nr.: DE 278287371

Bankverbindung:
Raiffeisenbank Bad Saulgau
KontoNr: 11 80 9000
BLZ: 650 630 86
IBAN: DE76 6506 3086 0008 9330 06
BIC: GENODES1SAG