


NOVARTIS

GenTeal™

Benetzende Augentropfen

 **Diese Gebrauchsinformation enthält wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig und bewahren Sie diese zur späteren Verwendung auf. Fehlerhafte Anwendung kann ernsthafte Probleme an Ihren Augen verursachen.**

Verwendungszweck

GenTeal™ sind Benetzungstropfen für Personen, die unter Trockenheitsgefühl, Fremdkörpergefühl und Ermüdungserscheinungen der Augen leiden, hervorgerufen durch umweltbedingte Reizstoffe oder Augenoperationen.

GenTeal™ Benetzungstropfen können für alle Kontaktlinsentypen verwendet werden.

Beschreibung

GenTeal™ sind sterile, leicht hypotone, wässrige Augentropfen, die 0,3 % Hypromellose enthalten.

GenTeal™ Benetzungstropfen enthalten das Konservierungssystem GenAqua™ [Natriumperborat und Phosphonsäure (Dequest 2060S)], das in geringen Mengen Wasserstoffperoxid produziert, das antibakteriell wirksam ist. Nach Kontakt mit der Augenoberfläche zerfällt Wasserstoffperoxid innerhalb einer Minute in Sauerstoff und Wasser.

STERILE | A | Hergestellt unter aseptischen Bedingungen

Anwendungsvorschriften

- Waschen Sie Ihre Hände.
- Tropfen Sie 1–2 Tropfen in jedes Auge (vermeiden Sie das Auge mit der Tropferspitze zu berühren) und blinzeln Sie mehrere Male.

Gegenanzeigen

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Vorsichtsmaßnahmen

- Vor der ersten Anwendung die Unversehrtheit der Flaschenversiegelung überprüfen. Nicht verwenden, wenn diese beschädigt ist.
- Geöffnete Flasche innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Die restliche Lösung verworfen.
- Verschließen Sie die Flasche nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie die Lösung nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Falls Sie mehr als ein Medikament im Auge anwenden, sollten Sie zwischen den einzelnen Produkten einen zeitlichen Abstand von mindestens 5 Minuten einhalten. GenTeal™ sollte immer zuletzt angewendet werden.

- Flasche bei 8°C bis 25°C aufbewahren.
- Berühren Sie nie mit der Tropferspitze der Flasche eine Oberfläche oder das Auge, da dies die Lösung verunreinigen könnte.
- Um Kreuzkontaminationen zu vermeiden, sollte mit dem Inhalt der Flasche immer nur dieselbe Person behandelt werden.



Warnhinweise

- Für Kinder unerreichbar aufbewahren.
- Bei anhaltenden Beschwerden oder Irritationen sollten Sie das Produkt absetzen und Ihren Augenarzt aufsuchen.



Nebenwirkungen

GenTeal™ wird sehr gut vertragen. Nach dem Eintropfen kann es zu vorübergehendem Verschwommensehen kommen.

In seltenen Fällen wurde über Brennen, Stechen, allergische Reaktionen und Augenrötungen nach dem Eintropfen berichtet. Wenn Sie eine dieser Reaktionen bei sich beobachten, unterbrechen Sie die Anwendung und suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

Packungsinhalt

- 1 x 10 ml
- 3 x 10 ml als Vorteilspackung

Bonuspunkte für den Treuepass



Entsprechend den nationalen Anforderungen im Hausmüll entsorgen.



CE 0123

Hersteller

Novartis Farma S.p.A.
Largo Boccioni 1
21040 Origgio (VA) Italien

Vertrieb durch

Novartis Pharma GmbH
90327 Nürnberg
Telefon: (09 11) 273-0
Telefax: (09 11) 273-12 653

Haltbarkeit

Ungeöffnet:
24 Monate bei 8°C bis 25°C
Geöffnet:
3 Monate bei 8°C bis 25°C

Inhaltsstoffe

Hypromellose, Natriumchlorid, Borsäure, Kaliumchlorid, Natriumperborat, Phosphonsäure (Dequest 2060S), Salzsäure (zum Puffern des pH-Wertes), Wasser für Injektionszwecke

Stand der Information

Januar 2008

TREUEPASS

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, Ihre Augen langfristig mit **GenTeal™** zu schützen.

- Tropfen Sie 1-2 Tropfen in jedes Auge (vermeiden Sie das Auge mit der Tropferspitze zu berühren) und blinzeln Sie mehrere Male.

Novartis Farma S.p.A.
Largo Boccioni 1
21040 Origgio (VA) Italien

Gegenanzeigen

Verwenden Sie das Produkt nicht bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Vorsichtsmaßnahmen

- Vor der ersten Anwendung die Unversehrtheit der Flaschenversiegelung überprüfen. Nicht verwenden, wenn diese beschädigt ist.
- Geöffnete Flasche innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Die restliche Lösung verwerfen.
- Verschließen Sie die Flasche nach dem Gebrauch.
- Verwenden Sie die Lösung nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Falls Sie mehr als ein Medikament im Auge anwenden, sollten Sie zwischen den einzelnen Produkten einen zeitlichen Abstand von mindestens 5 Minuten einhalten. GenTeal™ sollte immer zuletzt angewendet werden.

Vertrieb durch

Novartis Pharma GmbH
90327 Nürnberg
Telefon: (09 11) 273-0
Telefax: (09 11) 273-12 653

Haltbarkeit

Ungeöffnet:
24 Monate bei 8°C bis 25°C
Geöffnet:
3 Monate bei 8°C bis 25°C

Inhaltsstoffe

Hypromellose, Natriumchlorid, Borsäure, Kaliumchlorid, Natriumperborat, Phosphonsäure (Dequest 2060S), Salzsäure (zum Puffern des pH-Wertes), Wasser für Injektionszwecke

Stand der Information

Januar 2008

TREUEPASS

Liebe Patientin, lieber Patient,

Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, Ihre Augen langfristig mit **GenTeal™** zu schützen.

Nach Einsendung dieser Treuekarte erhalten Sie von Novartis Ophthalmics einmalig eine praktische Tropfhilfe, die Ihnen das Eintropfen von **GenTeal™** noch leichter macht.

Zusätzlich belohnt Novartis Ophthalmics Ihre Treue. Sammeln Sie die auf der Packungslasche aufgedruckten Treuepunkte. Sie erhalten dann für je **6 Treuepunkte** eine Packung **GenTeal™** gratis.



So einfach kommen Sie an die Tropfhilfe und GenTeal™:

Zum Erhalten der Tropfhilfe schicken Sie diesen Abschnitt ausgefüllt an:

Novartis Pharma GmbH
BU Ophthalmics
Roonstr. 25
90429 Nürnberg

Danach senden Sie jeweils 6 Treuepunkte (abgetrennte Packungslaschen) an dieselbe Adresse, um Ihre Gratispackung **GenTeal™** zu erhalten.

Bitte Absender und Unterschrift nicht vergessen!

Name _____ Straße _____

PLZ _____ Ort _____ Telefon _____

Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten gespeichert und bearbeitet werden, so dass Sie am Bonuspunkte-System teilnehmen können und auch zukünftig Informationen hierzu von Novartis Pharma erhalten. Novartis Pharma versichert Ihnen hiermit, dass Ihre Daten nicht an Dritte zu werblichen Zwecken weitergeleitet werden.

Unterschrift _____

 **NOVARTIS**
OPHTHALMICS

DE

23254403

MS-Nr.: 01/8.6