
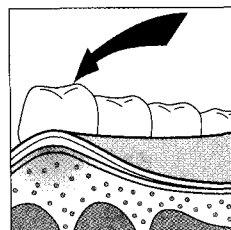
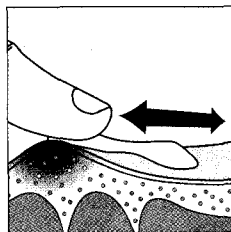


**Gebrauchsinformation!**  
**Bitte aufmerksam lesen!**

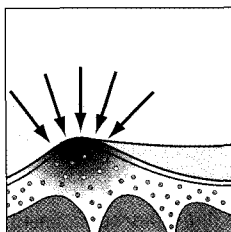

**Zusammensetzung:**  
Protefix® Wund- und Schutzgel enthält:  
Glycerol-Oxytriester (TGO),  
Siliciumdioxid, Saccharin-Natrium, Aroma.

## Protefix® Wund- und Schutzgel

**Protefix®** Wund- und Schutzgel zum Auftragen auf die entzündete Mundschleimhaut.

### **Anwendung**

Mund ausspülen, gegebenenfalls von Prothesen-Haftmittelresten reinigen. Ca. 3 – 4 x täglich eine erbsengroße Menge **Protefix®** Wund- und Schutzgel auf ein Wattestäbchen oder die saubere Fingerkuppe geben und auf die betroffenen Stellen auftragen, dabei leicht einmassieren.

Achten Sie bitte darauf, dass der entstehende Schutzfilm möglichst gleichmäßig verteilt wird und so nachhaltig wirken kann.

Warten Sie ca. 15 Minuten, bevor Sie Nahrung zu sich nehmen. Den Mund unmittelbar nach der Anwendung nicht ausspülen.

### **Gegenanzeigen**

Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

### **Nebenwirkungen**

**Protefix®** Wund- und Schutzgel soll für das angegebene Anwendungsgebiet verwendet werden, kann aber einen ärztlichen Rat nicht ersetzen. Sollten die Symptome länger als fünf Tage anhalten oder Verschlimmerung eintreten (besonders bei Blutungen oder Infektionen), empfiehlt es sich, ärztlichen oder zahnärztlichen Rat einzuholen. Bei Verdacht auf Vorliegen einer Überempfindlichkeitsreaktion sollte vorsichtshalber die Behandlung unterbrochen und ein Arzt aufgesucht werden. Bei großflächiger Anwendung kann an den behandelten Stellen die Wirkung von Haftmitteln beeinflusst werden.

### **Achtung! Bitte beachten Sie folgende Hinweise:**

- **Protefix®** Wund- und Schutzgel nur gemäß der oben aufgeführten Anwendungsbeschreibung verwenden.
- Nach Gebrauch die Tube sorgfältig verschließen, die Öffnung dabei sauber und trocken halten, um Verunreinigungen auszuschließen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden.

580439

CE



**Protefix®** Wund- und Schutzgel ist ein Medizinprodukt zur Anwendung bei Druckstellen, Entzündungen der Mundschleimhaut und Aphthen, insbesondere unter Prothesen, Teilprothesen und Zahnsparingen. Es enthält Glycerol-Oxytriestere („TGO“), das durch ein neuartiges Verfahren aus speziellen Pflanzenölen gewonnen wird, und besitzt ein patentiertes Wirkprinzip:

**Protefix®** Wund- und Schutzgel

**ohne Lidocain,  
ohne Alkohol**

- bildet einen Schutzfilm, der die Wunde vor äußeren Reizen schützt
- lindert den Schmerz
- kein Taubheitsgefühl
- keine negative Beeinflussung der Mundflora

## Ihre Meinung liegt uns am Herzen.



Haben Sie Fragen oder Anregungen, dann schreiben Sie uns bitte. Gerne möchten wir uns um Ihre Wünsche kümmern. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie mit, dass wir uns in Zukunft optimal auf die Bedürfnisse der Verwender von **Protefix®** Produkten einstellen können. Selbstverständlich sind alle Angaben freiwillig. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Selbstverständlich beachten wir die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Für Ihre Mithilfe bedanken wir uns ganz herzlich.

**Wie haben Sie **Protefix®** Wund- und Schutzgel kennengelernt?**

- Apotheker     Probe  
 Zahnarzt     Werbung

**Wobei verwenden Sie **Protefix®** Wund- und Schutzgel?**

- bei Druckstellen unter Zahnsparingen oder Prothesen  
 bei Aphthen  
 bei Entzündungen der Mundschleimhaut

**Ihre persönlichen Daten**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

**Sind Sie mit der Schutzwirkung zufrieden?**

- Ja     Nein, weil \_\_\_\_\_

**Verwenden Sie noch andere **Protefix®** Produkte?**

- Ja, und zwar \_\_\_\_\_  
 Nein

Ich bin \_\_\_\_\_ Jahre alt und verwende **Protefix®** Wund- und Schutzgel seit \_\_\_\_\_ Jahren.

  
**Queisser**  
PHARMA

D-24914 Flensburg  
www.queisser.de

Ja ich bin damit einverstanden, dass meine o.a. Daten für Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen und für Zwecke der Produktwerbung durch die Queisser GmbH & Co. KG erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Bitte einschicken an: Queisser GmbH & Co. KG, Schleswiger Straße 74, 24941 Flensburg.  
Weitere Informationen unter: [www.protefix.de](http://www.protefix.de) oder E-mail: [info@queisser.de](mailto:info@queisser.de).

