

## Gebrauchsanweisung

### BIOLAN® gel

(Natriumhyaluronat 0,30 %)

#### Hochviskose Augentropfen

#### BESCHREIBUNG

**BIOLAN® gel** ist ein steriler, konservierungsmittelfreier, viskoelastischer, hochviskoser Schutzfilm für die Hornhaut. Es besteht ausschließlich aus natürlichen, biologischen Substanzen. **BIOLAN® gel** schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig. Dadurch bewirkt es lang anhaltende Erleichterung bei Beschwerden in Zusammenhang mit • mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge, • bei Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung, beispielsweise durch Zigarettenrauch oder • bei Sehstress durch intensives Sehen, z. B. an Computerbildschirmen, Mikroskopen oder bei langen Autofahrten.

#### ANWENDUNG

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis vom Riegel ab. Vergewissern Sie sich, daß jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie die Verschlusskappe des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Geben Sie ein oder zwei Tropfen in jedes Auge oder auf die Innenseite der Kontaktlinse.

Wenn Sie anhaltende Probleme haben, besprechen Sie diese bitte mit Ihrem Augenarzt!

#### ZUSAMMENSETZUNG

Natriumhyaluronat (0,30 %), Natriumchlorid, Natriummonohydrogenphosphat, Natriumdihydrogenphosphat, gereinigtes Wasser.

#### PACKUNGSGRÖSSE


Verkaufseinheit: Ein-Dosis-Behältnisse, 20 x 0,45 ml und 60 x 0,45 ml.



#### VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

• Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis • Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren • Wegen des Kontaminationsrisikos Kontakt der Öffnung des Ein-Dosis-Behältnisses vermeiden • Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

• Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **BIOLAN® gel** keine Konservierungsmittel enthält, sollten Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden • Nicht gleichzeitig zusammen mit Augenarzneimitteln in das Auge eintropfen • Nicht an infizierten Augen anwenden • Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist • Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

#### LAGERUNG

Bei 2 °C bis 25 °C lagern. Vor Frost schützen. 

Chargennummer   
und Verfallsdatum 

auf dem Ein-Dosis-Behältnis eingepreßt.

STERILE A



Art.-Nr. 22.0117.03

Hersteller:  
Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstraße 3  
D-92551 Stulln

Vertrieb in Deutschland:  
Santen Oy, Niittyhaankatu 20,  
33720 Tampere, Finnland  
Ansprechpartner: Santen GmbH,  
Industriestrasse 1, 82110 Germering

CE 0483