



Deutsch

3

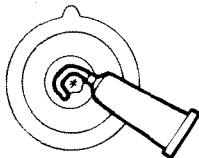

6

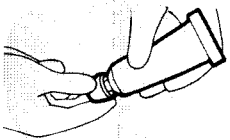

Anwendungsgebiete

Die Coloplast Paste wird äußerlich angewendet zum Ausgleichen von Hautunebenheiten.

Anwendung

1. Die Coloplast Paste wird direkt aus der Tube auf die Haut gebracht.

2. Wenn nötig, kann die weiche Paste mit einem angefeuchteten Finger, einer feuchten Kompresse oder einem Spatel anmodelliert werden. Nach kurzer Zeit ist die Paste angetrocknet und die Versorgung kann angebracht werden.

3. Bei tiefen Unebenheiten ist es empfehlenswert, mehrere Schichten Paste aufzutragen. Die einzelnen Schichten sollten einige Sekunden trocknen, bevor eine weitere aufgetragen wird.

4. Die Stomaversorgung wird um das Stoma angedrückt, um eine exakte Abdichtung zu erreichen.

5. Zum Schutz vor Austrocknen sollte die Tube sofort nach Gebrauch wieder verschlossen werden.

Anwendung bei zweiteiligen

Systemen

6. Es ist auch möglich nach dem Anbringen der Basisplatte Paste rund um das Stoma aufzutragen.

Entfernung

Die Paste wird mit der Versorgung entfernt. Reste lassen sich bei der Reinigung mit Wasser und Seife oder der Comfeel Reinigungs lotion entfernen. Eventuelle Rückstände nach der Reinigung können auf der Haut belassen werden.

Hinweis

Die Paste enthält Alkohol. Bei Anwendung auf geschädigter Haut kann es zu anfänglichem Brennen kommen. **Nicht anwenden bei offenen Wunden.**

Nicht zur Wiederverwendung.

Sehr geehrter Coloplast Kunde, wenn Sie weitere Fragen zum Produkt oder Ihrer persönlichen Versorgung haben, rufen Sie unseren Beratungsservice für Betroffene an.

Tel.: 0180-Coloplast
Tel.: 0180-265675278
6 cent pro Anruf.

Español

Importante

La Pasta Coloplast está preparada para la aplicación externa. La Pasta Coloplast contiene alcohol y no debe ser aplicada directamente en herida abierta o en úlceras de piel. Cuando se aplica sobre la piel irritada o erosionada, podrá sentir una sensación de escozor. Si la piel se irrita y persiste la irritación, consulte con un profesional sanitario.

Aplicación

1. La Pasta Coloplast puede ser aplicada directamente desde el tubo a la piel, formando un anillo de pasta alrededor del estoma.

1a. Quizá Ud. prefiera aplicarla directamente alrededor del disco, rodeando el orificio abierto del disco por donde se introduce el estoma.

2. Si e...
uniform...
para el...
una es...

3. En c...
recomi...
entre c...
que la...
secad...

4. Des...
que ha...
pasta...
dedos...

5. Cier...
despu...
el seca...
pasta.

Sólo p...
de do...
Sellad...
bolsa.