

Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig.

Legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid nach unten.

HYLO-CARE®

Natriumhyaluronat und Dexpanthenol

**Sterile, phosphatfreie Lösung ohne Konservierungsmittel
Zur verbesserten Befeuchtung, Erfrischung und Pflege der Augenoberfläche.**

Was ist HYLO-CARE®?

HYLO-CARE® ist eine sterile, konservierungsmittelfreie Lösung mit 1 mg/ml Natriumhyaluronat, Dexpanthenol, einem Citratpuffer und Wasser.

Wozu braucht man HYLO-CARE®?

Zur verbesserten Befeuchtung, Erfrischung und Pflege der Augenoberfläche.

Wann sollte man HYLO-CARE® anwenden?


Zur Gesunderhaltung des Auges müssen die äußeren Gewebe Bindehaut und Hornhaut ständig feucht gehalten werden. Nur dann kann das Auge optimal funktionieren und Beschwerden können verhindert werden. Wenn bei Aufenthalt in trockener, klimatisierter Umgebung, nach Einfluss von Wind und Sonne oder am Ende eines langen Tages die Augen brennen, jucken oder sich müde und trocken anfühlen, können dies Zeichen dafür sein, dass das Auge nicht ausreichend mit Feuchtigkeit versorgt ist. Dann ist es sinnvoll, durch Anwendung von HYLO-CARE® dem Auge intensive Feuchtigkeit zuzuführen und damit die natürliche Feuchtigkeitsbalance wieder herzustellen.

HYLO-CARE® enthält das Natriumsalz der Hyaluronsäure, eine natürliche Substanz, die im Auge, aber auch in anderen Körperteilen zu finden ist. Sie hat die besondere physikalische Eigenschaft, einen gleichmäßigen, stabilen und besonders lang haftenden Feuchtigkeitsfilm auf der Oberfläche des Auges zu bilden, ohne rasch abgespült zu werden. Dadurch hält der feuchtigkeitspendende Effekt besonders lange an, ohne dabei Ihre Sehleistung zu beeinträchtigen. **Deshalb können Sie HYLO-CARE® problemlos während des Tages benutzen, wenn z.B. Augensalben wegen ihrer fetthaltigen Konsistenz, die zu Schleiersehen führt, nicht angewandt werden können.**


Darüber hinaus enthält HYLO-CARE® Dexpanthenol, das zu der großen Stoffklasse der B-Vitamine gehört. Durch diesen Bestandteil wird das Bedürfnis des Auges nach intensiver Regeneration gedeckt und die befeuchtenden Eigenschaften von Natriumhyaluronat werden hierdurch sinnvoll unterstützt.

HYLO-CARE® kann damit gereizten Augen sofortige Linderung verschaffen und das Auge frisch und gesund erhalten.

Wie wendet man HYLO-CARE® an?

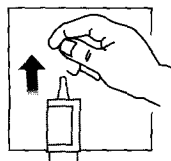

Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen.

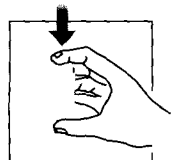

Bitte vor der ersten Anwendung von HYLO-CARE® die Flasche mit der Tropferspitze senkrecht nach unten halten und so oft auf den Flaschenboden drücken, bis der erste Tropfen an der Flaschenspitze austritt. Danach ist die Flasche für die folgenden Anwendungen gebrauchsfertig. Halten Sie die Flasche mit der Tropferspitze nach unten und drücken Sie schnell und kräftig in der Mitte auf den Flaschenboden. Dadurch wird der Mechanismus zur Entnahme eines Tropfens betätigt. Aufgrund der besonderen Ventiltechnik des COMOD®-Systems ist die Größe und Geschwindigkeit des Tropfens auch bei sehr kräftigem Druck auf den Flaschenboden immer gleich.



INFO-GUTSCHEIN

Ja, ich möchte mehr über die Augen-Produkte, sonstigen Produkte und Produktneuheiten von URSAPHARM erfahren. Bitte senden Sie mir zukünftig weitere Informationsmaterialien zu.

Vorname

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel.

E-Mail

Alter*

Beruf*


*Freiwillige Angabe

Datum

Unterschrift


Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für interne Zwecke gespeichert und genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Mein Einverständnis zur Datenspeicherung kann ich jederzeit schriftlich gegenüber URSAPHARM widerrufen. Im Falle eines Widerrufs wird URSAPHARM meine personenbezogenen Daten unverzüglich löschen.

Nehmen Sie auch an unserer umseitigen Meinungsumfrage teil

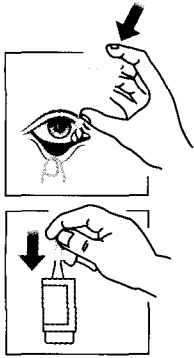

Legen Sie den Kopf etwas zurück, ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab und bringen Sie wie beschrieben einen Tropfen in den unteren Bindehautsack ein. Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann.

Nach Gebrauch die Tropferspitze sofort sorgfältig mit der Kappe verschließen. Bitte achten Sie darauf, dass die Tropferspitze trocken ist. Vermeiden Sie beim Tropfen einen Kontakt der Tropferspitze mit Auge oder Gesichtshaut.

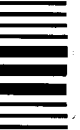

Dem COMOD®-System können 10 ml Lösung entnommen werden; dies entspricht etwa 300 Tropfen. Aus produktionstechnischen Gründen bleibt stets ein kleiner Flüssigkeitsrest in der Flasche zurück.

Mit dem Inhalt einer Flasche HYLO-CARE® sollte immer dieselbe Person behandelt werden.

Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?

Für den Fall einer zusätzlichen anderen medikamentösen Behandlung mit Augentropfen sollte ein Anwendungsabstand von mindestens 30 Minuten eingehalten werden. HYLO-CARE® sollte dann immer zuletzt verabreicht werden. Augensalben sollten in jedem Fall nach HYLO-CARE® in den Bindehautsack eingestrichen werden.

Aufgrund seiner Konservierungsmittelfreiheit ist HYLO-CARE® auch bei langdauernder Anwendung besonders gut verträglich. Sie können es deshalb auch über einen längeren Zeitraum benutzen. In sehr seltenen Einzelfällen wurde von Überempfindlichkeitsreaktionen (Brennen, Tränenfluß) berichtet, die nach Absetzen von HYLO-CARE® direkt abklingen.

HYLO-CARE® kann während des Tragens von harten oder weichen Kontaktlinsen angewandt werden.

Wie oft und wie lange sollte man HYLO-CARE® anwenden?

HYLO-CARE® sollte individuell nach Ihrer Befindlichkeit und der Empfehlung Ihres Augenarztes oder Apothekers dosiert werden. Im Allgemeinen tropfen Sie 3 mal täglich 1 Tropfen HYLO-CARE® in den Bindehautsack jeden Auges. Bei stärkeren Beschwerden kann HYLO-CARE® öfters am Tag getropft werden. Sollten Sie HYLO-CARE® häufiger (z. B. mehr als 10mal täglich) anwenden, lassen Sie Ihre Augen von Ihrem Augenarzt untersuchen.

HYLO-CARE® ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie - wie bei allen Erkrankungen - bei länger anhaltenden Beschwerden einen Augenarzt um Rat fragen.

Wann sollte man HYLO-CARE® nicht anwenden?

HYLO-CARE® sollte nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile angewendet werden.

Welche Hinweise zur Aufbewahrung von HYLO-CARE® sind zu beachten?

Bei Raumtemperatur lagern.

Nach Anbruch einer Flasche ist HYLO-CARE® 12 Wochen verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums (☞) nicht mehr anwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Folgende Packungsgrößen sind erhältlich:

- 10 ml Augentropfen
- 2 x 10 ml Augentropfen

Stand der Information:

April 2007

Hersteller: URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG
 Industriestr., D-66129 Saarbrücken
 Tel.: 06805/9292-0
 Fax: 06805/9292-88
 email: info@ursapharm.de



IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG!

Wann wenden Sie HYLO-CARE® an?

- Zur Befeuchtung der Augen
- Anderer Grund:

Wie beurteilen Sie HYLO-CARE® Augentropfen?

Die Befeuchtung der Augen:

- | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="radio"/> Sehr gut | <input type="radio"/> Gut | <input type="radio"/> Teils/teils | <input type="radio"/> Schlecht | <input type="radio"/> Sehr schlecht |
| Die Wirkungsdauer: | | | | |
| <input type="radio"/> Sehr gut | <input type="radio"/> Gut | <input type="radio"/> Teils/teils | <input type="radio"/> Schlecht | <input type="radio"/> Sehr schlecht |
| Die Verträglichkeit: | | | | |
| <input type="radio"/> Sehr gut | <input type="radio"/> Gut | <input type="radio"/> Teils/teils | <input type="radio"/> Schlecht | <input type="radio"/> Sehr schlecht |

Bitte senden Sie diesen Coupon an:
 URSAPHARM Arzneimittel GmbH & Co. KG
 Industriestr. 35
 66129 Saarbrücken

oder per Fax an: 06805 / 9292222
 oder über www.ursapharm.info/hylocare

Fordern Sie mit dem umseitigen INFO-GUTSCHEIN Informationsmaterialien zu Produkten von URSAPHARM!