

# Replens® sanol

## feuchtigkeitsspendendes Vaginalgel mit 3-Tages-Effekt

**Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch, bevor Sie Replens® sanol anwenden.**

### 1. Was ist Replens® sanol und wofür wird es angewendet?

Replens® sanol ist ein feuchtigkeitsspendendes Vaginalgel mit 3-Tages-Effekt.

Replens® sanol lindert Symptome der vaginalen Trockenheit und Atrophie wie Juckreiz, Brennen und Missempfindungen beim Intimverkehr.

### 2. Wie wirkt Replens® sanol?

Replens® sanol haftet an der Scheidenwand an und sorgt so für Feuchtigkeit und Gleitfähigkeit. Das Gel bleibt mehrere Tage mit der Scheidenwand in Kontakt, währenddessen wird das im Gel enthaltene Wasser aufgenommen. Der pH-Wert von Replens® sanol entspricht dem eines gesunden Scheidenmilieus.

### 3. Wann sollte Replens® sanol nicht angewendet werden?

Replens® sanol sollte nicht während der Schwangerschaft und nicht unmittelbar nach der Geburt angewendet werden. Sie sollten es auch nicht verwenden, wenn Sie allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagieren. Replens® sanol enthält keinen Spermien abtötenden Wirkstoff und schützt deshalb nicht vor ungewollter Schwangerschaft.

### 4. Wie wird Replens® sanol angewendet?

Replens® sanol verbessert den Zustand der Scheidenwand und lindert die Beschwerden der vaginalen Trockenheit und Atrophie.

Die Anwendung sollte jeden dritten Tag, vorzugsweise am Morgen erfolgen. Bei Bedarf können Sie Replens® sanol seltener oder öfter, bis zu einmal täglich, anwenden.

Replens® sanol beruht auf einer wässrigen Basis und ist daher zur Anwendung mit Kondomen geeignet. Es wird allerdings empfohlen, Replens® sanol nicht unmittelbar vor dem Intimverkehr anzuwenden.

Replens® sanol beeinträchtigt weder die Beweglichkeit noch die Lebensfähigkeit der Spermien, so dass die Empfängnisfähigkeit nicht vermindert wird. Replens® sanol enthält keine Hormone und kann deshalb zusammen mit einer Hormonersatztherapie verwendet werden.

Replens® sanol wird mit einem hygienischen Einmalapplikator in die Scheide eingeführt. Der Applikator ermöglicht es, die vorgesehene

Menge Replens® sanol dorthin zu bringen, wo sie benötigt wird.


### Gebrauchsanweisung für Replens® sanol: gebrauchsfertiger Einmalapplikator

Jeder Applikator ist in einer gesonderten versiegelten Umhüllung verpackt. Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn die mit Replens® beschriftete Umhüllung fehlt oder beschädigt ist. Verwenden Sie das Produkt auch NICHT, wenn die Packung beim Kauf bereits geöffnet ist.


Nehmen Sie den Applikator aus der versiegelten Umhüllung.

Zu diesem Zeitpunkt darf der Abreißverschluss des Applikators NOCH NICHT entfernt werden.


1. Halten Sie den Applikator an seinem dickeren Ende gut fest. Schütteln Sie ihn 3-5 Mal wie ein Thermometer, damit der Inhalt des Applikators zu seinem dünnen Ende hin gelangen kann.

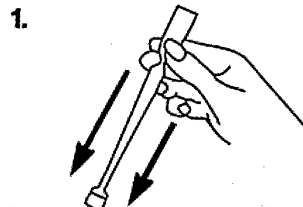


2. Drehen Sie den Abreißverschluss des Applikators ab und entsorgen Sie ihn.

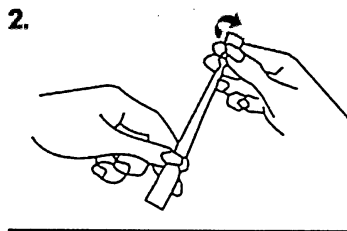

3. Führen Sie, sitzend oder mit angezogenen Knien auf dem Rücken liegend, das dünnere Ende des Applikators so tief wie möglich vorsichtig in die Scheide ein.

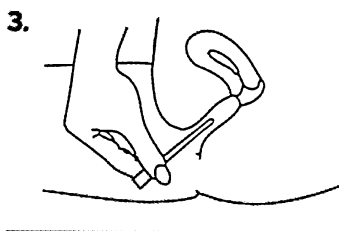

4. Drücken Sie fest auf das dickere Ende des Applikators, damit das Gel austreten kann. Ziehen Sie anschließend den Applikator aus der Scheide heraus und entsorgen ihn.

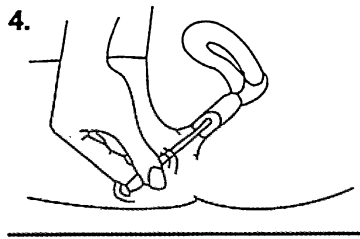

#### Hinweis

Die Konstruktion des Applikators garantiert, dass die empfohlene Menge an Gel austreten kann. Bei richtiger Handhabung bleibt nach der Anwendung nur eine Restmenge an Gel im Applikator zurück.

#### 5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

In einigen Fällen kann einige Tage nach Beginn einer Erstbehandlung mit Replens<sup>®</sup> sanol ein weißlicher Ausfluss, der trocken oder krümelig sein kann, auftreten. Normalerweise reinigt sich die Scheide selbst. Ist sie jedoch über einen bestimmten Zeitraum trocken, können sich abgestorbene Zellen anhäufen. Replens<sup>®</sup> sanol haftet an diesen Zellen und spült sie heraus. Bei fortgesetzter Behandlung normalisiert sich das Scheidenmilieu und der Ausfluss wird allmählich schwächer. Wenn Sie weitere unangenehme Wirkungen beobachten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

#### 6. Wie ist Replens<sup>®</sup> sanol aufzubewahren?



Nicht über 25°C lagern!  
Nicht in Reichweite von Kindern lagern!  
Nicht bei Kindern anwenden!  
Kontakt mit Augen und Ohren vermeiden!  
Nur bis zu dem auf dem Behältnis und der Faltschachtel aufgedruckten Verfalldatum verwenden!

#### 7. Inhaltsstoffe

Gereinigtes Wasser (Ph. Eur.) 78,82 % w/w, Polycarbophil, Paraffinum liquidum, Glycerol, hydriertes Palmölglycerid, Carbomer 974P, Sorbinsäure und Natriumhydroxid

Replens<sup>®</sup> sanol ist ein weiches weißes Vaginalgel.

#### 8. Darreichungsformen und Inhalt

Replens<sup>®</sup> sanol ist in Packungen mit 3 oder 9 Applikatoren zur vaginalen Anwendung erhältlich.

#### 9. Vertrieb

SANOL GmbH  
Alfred-Nobel-Straße 10  
40789 Monheim  
Telefon: 02173/48-5857  
Telefax: 02173/48-5851  
4007877 0807-0 9/15 526

#### Hersteller



Lil' Drug Store Products, Inc.  
1201 Continental Place NE  
Cedar Rapids, IA 52402, USA



P.Q.S. Medical B.V.  
P.O. Box 36  
NL-1180 AA Amstelveen  
Niederlande

Hergestellt in Großbritannien.

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Oktober 2007.

83000I-GER-10-07

CE 0120

#### Vaginale Trockenheit – Antworten auf häufig gestellte Fragen

**Leiden viele Frauen an vaginaler Trockenheit und damit verbundenen Juckreiz, Brennen oder Missempfindungen beim Intimverkehr?**

Vaginale Trockenheit ist sehr häufig und muss nicht generell altersbedingt sein. Am häufigsten tritt sie bei Frauen vor und nach der Menopause auf. Sie kann aber auch bei stillenden Müttern, bei Frauen, die eine bestimmte medikamentöse Therapie erhalten sowie nach einer Gebärmutterentfernung vorkommen. Juckreiz, Brennen und Missempfindungen beim Intimverkehr als Ergebnis einer lang anhaltenden Scheidentrockenheit sind besonders im höheren Lebensalter häufig.


**Was kann vaginale Trockenheit und damit verbundenen Juckreiz, Brennen und Missempfindungen beim Intimverkehr verursachen?**

Ursache ist ein Mangel an natürlicher Feuchtigkeit in der Scheide. Die Feuchtigkeitsmenge wird durch das Hormon Östrogen gesteuert. Bei niedrigem Östrogenspiegel, wie er natürlicherweise im Rahmen der Wechseljahre vorliegt, werden sowohl der innere als auch der äußere Scheidenbereich trocken. Und das kann zu Juckreiz, Brennen und Missempfindungen beim Intimverkehr führen.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.replens-sanol.de](http://www.replens-sanol.de).



Nur einmal verwenden

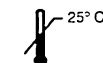

Nicht über 25°C lagern!



Chargenbezeichnung



Verwendbar bis

EXP



Bitte Gebrauchsinformation beachten!

Replens<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lil' Drug Store Products, Inc.