

Scheidenprobleme haben viele Frauen

Obwohl Beschwerden im Scheidenbereich bei Frauen jeder Altersstufe vorkommen können, sind sie doch in den Wechseljahren von besonderer Bedeutung. In diesem Lebensabschnitt nimmt die Hormon-Produktion der Eierstöcke immer mehr ab. Der sinkende Östrogenspiegel führt zu Veränderungen in der Scheide: Die Haut der Scheide wird immer dünner, die Größe der Vagina nimmt ab, auch ihre Elastizität und Dehnbarkeit lassen nach. Die geringere Scheidenflüssigkeit und Durchblutung der Vagina können zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr führen. Reizungen und Brennen im Intimbereich sind weitere mögliche Folgen des Östrogenmangels.

Alle diese Beschwerden werden gelindert durch

- 1) ausreichende Anfeuchtung
- 2) Schutz der empfindlichen Haut
- 3) Förderung der natürlichen Physiologie
- 4) Verbesserung der Gleitfähigkeit
- 5) Förderung der natürlichen Hautregeneration

Hierbei helfen natürliche Mittel. Gynomunal Vaginalgel kann Haut und Gewebe schützen, gleitfähig machen und regenerieren.

Gynomunal Vaginalgel

Gynomunal Vaginalgel ist ein Medizinprodukt, das gezielt für die Hilfe bei Scheidenbeschwerden entwickelt wurde. Der Aktiv-Komplex von Gynomunal Vaginalgel enthält Liposomen, Hyaluronsäure, Hopfenextrakt und Vitamin E.

Liposomen sind winzige „Kügelchen“, die in einer Fetthülle Wasser speichern und langsam abgeben. Sie sichern dadurch eine langanhaltende Feuchtigkeit in der Scheide. Liposomen können auch durch Zellwände gelangen und somit die tiefen Hautschichten des Scheidengewebes mit Wasser versorgen.

Auch die **Hyaluronsäure** ist ein Feuchtigkeitsspender. Sie kann das 1000-fache ihres Eigengewichts an Wasser binden und dieses abgeben. Außerdem bildet sie einen flüssigen Film, der wichtige Eigenschaften hat:

- 1) *Schutz*: Der Film schützt das Vaginalepithel; Haut-Irritationen (z.B. Juckreiz, Brennen) können vermindert werden.
- 2) *Gleitfähigkeit*: Die Filmschicht erhöht die Gleitfähigkeit.
- 3) *Hilfe bei Geweberegeneration und Wundheilung*: Der flüssige Film bedeckt und isoliert geschädigte Hautflächen in der Vagina.

Die natürlichen pflanzlichen Regulatoren des **Hopfenextraktes** unterstützen die Hyaluronsäure, indem sie die Haut der Scheide stabilisieren und schützen. Sie helfen auch die Vaginalhaut bei Beschwerden in den Wechseljahren, z. B. aufgrund von Östrogenmangel, zu regenerieren.

Vitamin E ist eine antioxidative Substanz. Sie schützt Zellwände vor schädlichen freien Radikalen, die u. a. durch Rauchen, Stress und intensive körperliche Belastung entstehen.

Gynomunal Vaginalgel

Gebrauchsanweisung

Spendet Feuchtigkeit und regeneriert die Vaginalhaut (z. B. bei Beschwerden aufgrund von Östrogenmangel in den Wechseljahren)

Zusammensetzung

gereinigtes Wasser, Propylenglycol, Ethanol denat., Hopfenextrakt (Humulus lupulus), Sojalecithin (E322), Carbomer, Methyl-4-hydroxybenzoat (E219), Cholesterol, Imidazolidinylharnstoff, Triethanolamin, Natriumedetat, Hyaluronsäure, Propyl-4-hydroxybenzoat (E217), Tocopherolacetat (Vitamin E)

Anwendungsbereich

Die innovative Formulierung mit einem speziell entwickelten Komplex aus Hyaluronsäure, „low-sized“ Liposomen, Hopfenextrakt und Vitamin E hilft die natürliche Scheidenfeuchtigkeit zu verbessern und unterstützt die Regeneration der Vaginalschleimhaut (z.B. bei Östrogenmangel in den Wechseljahren). Gynomunal Vaginalgel hält auch die Spannung und Festigkeit des perivaginalen und vaginalen Gewebes aufrecht. Schließlich kann es auch angewendet werden, um den Geschlechtsverkehr zu erleichtern.

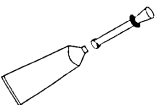
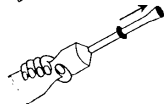

Kontraindikation : Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Anwendungsart

Gynomunal Vaginalgel sollte mit Hilfe des beigefügten Applikators (befüllt 2,5 g Vaginalgel) tief in die Scheide eingeführt werden (s. Anwendungshinweise). Die Anwendung sollte einmal täglich (vorzugsweise zur Schlafenszeit) an 7 aufeinanderfolgenden Tagen und anschließend zweimal pro Woche erfolgen.

Gynomunal Vaginalgel kann auch auf den perivaginalen Bereich (Scheidenöffnung und angrenzender äußerlicher Genitalbereich) aufgetragen werden, um das Einführen des Applikators zu erleichtern. Auch zur Begünstigung des Geschlechtsverkehrs oder bei Trockenheit der Vulva ist die perivaginale Anwendung möglich.

Anwendungshinweise

- A  A. Schrauben Sie den Applikator auf die Öffnung der Tube.
- B  B. Ziehen Sie den Kolben des Applikators bis zum Ende und drücken Sie auf die Tube, um 1 Dosis Vaginalgel zu erhalten.
- C  C. Schrauben Sie den Applikator ab und führen Sie ihn in die Scheide ein. Entleeren Sie die komplette Gel-Menge, indem Sie leicht auf den Kolben drücken.
- Reinigen Sie nach der Anwendung den Applikator sorgfältig auf folgende Weise:
- Zerlegen des Applikators durch Entfernen des Kolbens
 - Mit lauwarmem Wasser waschen

Führen Sie das dünne Kolbenende in die Öffnung des Applikators mit dem Gewinde vollständig ein bis Sie einen Widerstand spüren. Durch einen leichten Druck gelangt der Kolben durch das enge Applikatorende und befindet sich in der richtigen Position.

Gynomunal Vaginalgel ist kondomverträglich.

Medizinprodukt

CE 0477

Für Kinder unzugänglich aufbewahren!
Tube nach jedem Gebrauch verschließen.



Hersteller: POLICHEM S.A. - Via Senago, 42D - 6912 Lugano Pazzallo - Schweiz
Bevollmächtigter: BIOSELECTA s.r.l. - Via G. Marcora 11 - 20121 Mailand - Italien
Vertrieb: Taurus Pharma GmbH - Benzstraße 11 - 61352 Bad Homburg - Deutschland