

## Gebrauchsanweisung

### *Benetzende Augentropfen mit Hyaluronsäure – natürliche Befeuchtung: wohltuend und langanhaltend*

#### **Hylo-Vision® HD**

15 ml Augentropfen (Musterpackung: 5 ml)  
Natriumhyaluronat 0,1 %

#### **Anwendung:**

- Schützt und befeuchtet die Augenoberfläche und macht sie gleitfähig.
- Zur Linderung bei Trockenheitsgefühl und bei leichter, nicht als pathologisch einzustufender Reizung durch umgebungsbedingte Befindlichkeitsstörungen des Auges wie z. B. Brennen, Ermüdung, langes Arbeiten vor dem Bildschirm oder Tragen von Kontaktlinsen.
- Geeignet für Kontaktlinsen jeden Typs.

#### **Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

#### **Wechselwirkung mit anderen Mitteln:**

Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln oder anderen Produkten, welche auf das Auge aufgetragen werden, anwenden, da Hylo-Vision® HD deren Wirkung verändern kann.

#### **Produktbeschreibung:**

Hylo-Vision® HD 15 ml Augentropfen enthalten 0,1 % hochgereinigtes Natriumhyaluronat in Phosphat-gepufferter Kochsalzlösung mit Polyhexanid, ein sanftes Konservierungsmittel. Natriumhyaluronat ist eine natürliche Substanz, die auch im menschlichen Auge vorkommt. Das eingesetzte Natriumhyaluronat ist nicht tierischen Ursprungs, sondern wird fermentativ gewonnen. Der Ophthieninhalt wurde durch Filtration sterilisiert; die Keimfreiheit ist nur bei unversehrter Ophthiole gewährleistet.

#### **Zusammensetzung:**

1 ml Lösung enthält 1 mg hochgereinigtes Natriumhyaluronat, 0,0015 mg Polyhexanid (PHMB), 0,1 mg Natriumedetat (EDTA), isotonischer Phosphatpuffer, gereinigtes Wasser.

#### **Dosierung:**

Bei Bedarf 1–2 Tropfen Hylo-Vision® HD in den Bindehautsack einträufeln.

#### **Gebrauchshinweise:**

- Hände sorgfältig waschen und abtrocknen.
- Ophthiole auf ihre Unversehrtheit prüfen, um sicherzustellen, dass der Inhalt keimfrei ist.
- Zum Öffnen Schraubverschluss entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Brechen des Sicherheitsverschlusses drehen.
- Ophthiole mit der Öffnung nach unten halten und pro Auge je 1–2 Tropfen einträufeln. Durch Lidschlag wird die Lösung verteilt und bildet eine transparente Flüssigkeitsschicht auf der Augenoberfläche. Achten Sie darauf, dass das Auge nicht mit der Ophthiole in Berührung kommt, um Verletzungen oder Infektionen zu vermeiden.
- Die Augentropfen können zusammen mit Kontaktlinsen jeden Typs verwendet werden. Für Erwachsene und Kinder geeignet.

#### **Lagerung:**

Bei Temperaturen von 2–25° C. Nicht gefrieren lassen. Nach Öffnung 3 Monate haltbar. Vor Licht- bzw. Sonneneinstrahlung schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

#### **Aufbewahrung des Präparates:**

Die Lösung soll nach Ablauf des auf der Verpackung genannten Verfalldatums nicht mehr verwendet werden. Zu beachten: Nicht verwenden, wenn die Ophthiole beschädigt ist. Nicht verwenden, wenn die Flüssigkeit trüb ist oder eine Färbung aufweist. Das Auge nicht mit der Ophthiole berühren. Bei Nebenwirkungen jeglicher Art fachärztlichen Rat einholen.

#### **Stand der Gebrauchsinformation:**

Januar 2007

Medizinprodukt

**CE** 0473



OmniVision GmbH  
Lindberghstrasse 7  
D-82178 Puchheim  
www.omnivision-pharma.com

REF 520/00