



# LIQUIFILM®

## Benetzende Augen-Pflegetropfen

LIQUIFILM® sind Augen-Pflegetropfen, die Ihre Augenoberflächen benetzen und dabei Linderung beim durch Umweltfaktoren herbeigeführten Gefühl von Trockenheit im Auge, Augenreizung, Augenstechen oder Fremdkörpergefühl verschaffen. Durch seine physikalische Wirkweise kann LIQUIFILM® zur Verlängerung der Tragezeit von harten Kontaktlinsen angewendet werden.

### **Beschreibung:**

LIQUIFILM® ist eine sterile Poly(vinylalkohol) enthaltende Lösung in einem Mehrdosenbehältnis, die mit Benzalkoniumchlorid konserviert ist.

### **Hinweise für die Anwendung**

Mehrmals täglich nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen der Lösung in das/die Auge(n) träufeln.

### **Vorsichtshinweise**

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Lösung nicht einnehmen.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge vermeiden.
- Flasche sofort nach Gebrauch fest verschließen.
- Lösungsreste vier Wochen nach dem Öffnen verwerfen.
- Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums verwenden.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nicht über 25 °C lagern
- Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Versiegelung des Verschlusses vor dem ersten Öffnen beschädigt ist.
- Bei Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten zwischen den Anwendungen mindestens 5 Minuten liegen.
- Nicht während des Tragens von weichen Kontaktlinsen anwenden, da das Konservierungsmittel zur Verfärbung weicher Kontaktlinsen führen kann.

### **Warnhinweis**

Wenn Ihre Augenprobleme weiter bestehen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenarzt.

### **Wie ist das Produkt erhältlich?**

LIQUIFILM® ist in Kunststoffflaschen mit 10 ml Inhalt erhältlich.



**Hersteller:**

Allergan Pharmaceuticals Ireland  
Castlebar Road  
Westport, Co. Mayo  
Irland

**Lokaler Ansprechpartner:**

Pharm-Allergan GmbH  
Pforzheimer Straße 160  
D-76275 Ettlingen

**CE** 0123

**STERILE A**



**ALLERGAN**

® marks owned by Allergan, Inc.

© 2008 Allergan, Inc., Irvine CA 92612

72053EW10X